

INNOVATION

Compeed®


Herpesbläschen-Patch

Patch pour bouton de fièvre

BEI FIEBERBLASEN

Der diskrete Weg
für SCHNELLE
HILFE bei
Herpes-/
Fieberblasen an
der Lippe

*La manière
DISCRÈTE de
traiter
RAPIDEMENT les
boutons de fièvre*

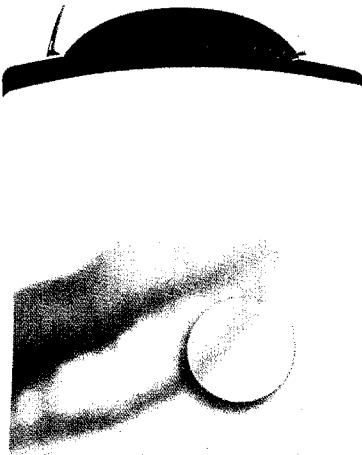



Compeed®

17883A

15 Pflaster
Patches

Inhalt: 15 Stück,
Größe: Ø 1,5 cm,
PZN 1744889

Körperliche und emotionale Symptome

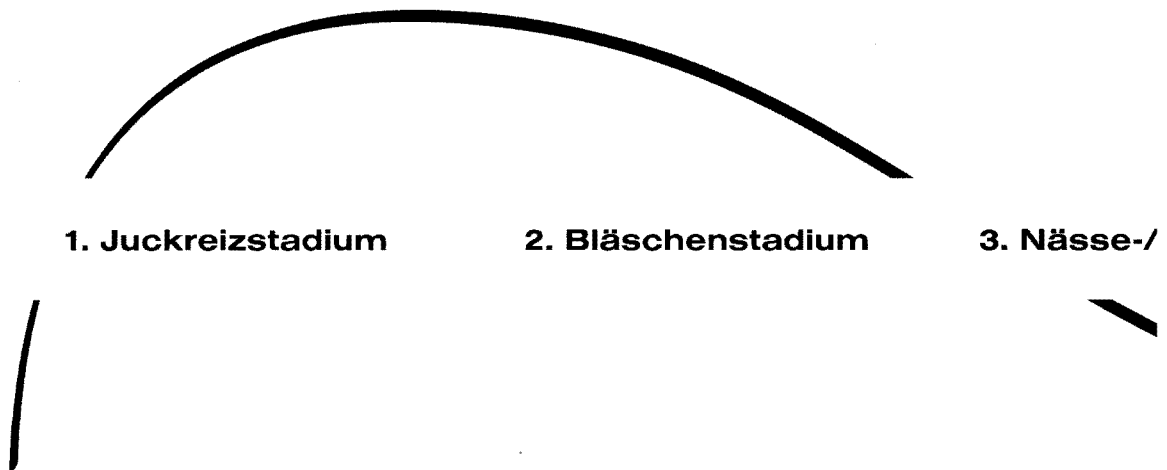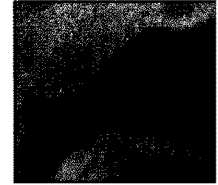

Wie lange dauert der Ausbruch von Lippenherpes?

Der Ausbruch dauert ca. 7–12 Tage und verläuft in 5 verschiedenen Stadien.

1. Juckreizstadium

Kribbeln, Hautspannung oder Schwellung.

2. Bläschenstadium

Erste sichtbare Anzeichen von Anhäufungen kleiner Bläschen.

3. Nässe-/Wundstadium

Bläschen platzen und hinterlassen eine nässende Wunde.

Das ansteckendste und schmerzhafteste Stadium.

4. Krustenstadium

Verschörfung. Juckreiz und Brennen mit Blutung, wenn die Verkrustung aufbricht.

5. Heilungsstadium

Verkrustung löst sich ab.

Mundstadium

4. Krustenstadium

5. Heilungsstadium



Keine schöne Zeit.

Herpesbläschen sind eine physische, psychische und soziale Belastung. Die Betroffenen sind meist durch folgende Einschränkungen während eines Herpesausbruchs frustriert:

- körperliche Erschöpfung aufgrund von Herpes während/nach einer Erkältung
- Probleme beim Essen und Trinken
- Einschränkung von körperlicher Nähe
- Verunsicherung durch das Gefühl, abstoßend auszusehen



Wodurch werden Herpesbläschen ausgelöst?

Der Ausbruch von Lippenherpes kann durch verschiedene äußere Faktoren ausgelöst werden, z. B.

- körperlichen und emotionalen Stress
- Fieber, Erkältung oder Grippe
- Ermüdung
- Sonneneinwirkung und ultraviolettes Licht
- kaltes Wetter
- Menstruation oder Hormonschwankungen



Was sind Herpesbläschen?

Herpesbläschen bilden sich infolge eines Ausbruchs von Lippenherpes oder Herpes labialis und sind mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen an Lippen, Nase oder Kinn. Sie werden durch das Herpes-simplex-Virus (HSV-1) hervorgerufen und gelten als die am weitesten verbreitete Form einer Herpes-simplex-Virusinfektion. Nahezu 90% der Menschen im Alter über 30 sind mit HSV-1 infiziert.

Wie überträgt sich das Virus?

Die Übertragung erfolgt durch engen körperlichen Kontakt mit einer infizierten Person wie z.B. Umarmen oder Küssen. Dabei zeigt eine mit Herpes infizierte Person zum Zeitpunkt der Übertragung nicht unbedingt die Symptome, Blasenbildung und/oder wund Stellen. HSV-1 gilt als sehr ansteckend.

diskrete Lösung bei Herpesbläschen.



Compeed® Herpesbläschen-Patch – der diskrete Weg für schnelle Hilfe bei Herpesbläschen.

Neuartiges, kaum sichtbares Patch mit dem Bestandteil Hydrokolloid-075. Bietet eine umfassende, klinisch getestete Behandlung von Lippenherpesausbrüchen in allen 5 Stadien der Erkrankung.

- Lindert und mindert Brennen und Juckreiz.
- Keine peinlichen Situationen mehr, da das Patch diskret die Stelle abdeckt und doch vollständig den Lippenherpesausbruch behandelt. Außerdem hilft das Patch, die Verbreitung des Virus zu verhindern.
- Reduziert in großem Umfang das Risiko weiterer Ansteckung.
- Die Hydrocure® System Technologie unterstützt den Aufbau von optimalen Heilungsbedingungen und beugt gleichzeitig der Bildung von Krusten vor.
- Keine Verschorfung und Verkrustung bedeutet keine Narbenbildung im Gesicht.

neuartige Soforthilfe bei Herpes.

Compeed® Herpesbläschen-Patch – der völlig neuartige Behandlungsansatz.

Das Angebot an OTC-Präparaten gegen Lippenherpes hat sich bislang auf die Behandlung des Virus konzentriert. Doch selbst mit der effektivsten antiviralen Creme ist eine Auslöschung des Virus unmöglich, da sich dieses nach Auftreten des Herpesbläschens an seinen Ruheort im Körper zurückzieht. Das Virus selbst kann nie wirklich beseitigt werden.

→ Daher ist es eine effiziente Alternative, die Herpesbläschen und ihre Symptome wie eine Wunde zu behandeln.

Das Compeed® Herpesbläschen-Patch ist auf dem Gebiet der Herpesbläschen-Behandlung bahnbrechend, da es eine neue therapeutische Option bietet, Herpesbläschen effektiv zu behandeln, indem es die Symptome in jeder Phase der Erkrankung bekämpft.



Die einzigartige Hydrokolloid-Technologie.

Das Compeed® Herpesbläschen-Patch nimmt die Blasenflüssigkeit auf. Ein Teil der Flüssigkeit verdunstet durch das Pflaster, der Rest bildet im Pflaster unmittelbar über der Läsion ein Flüssigkeitspolster. Optimale Bedingungen für eine feuchte Wundheilung, bei der die Bläschen nicht austrocknen und somit kein Schorf entsteht.



Das Compeed® Herpesbläschen-Patch ist ein Ergebnis dieser Hydrokolloid-Technologie. Sehr dünnschichtige Hydrokolloide gehören zu einer der fortschrittlichsten Technologien auf dem Gebiet der Wundbehandlung. Mit einer Dicke von nur 75 Mikrometern, einschließlich des luftdurchlässigen Films, ist es das dünnste Okklusivpflaster seiner Art, welches derzeit auf dem Markt ist.

→ Compeed® Herpesbläschen-Patch ist die diskreteste Art und Weise zur Behandlung von Herpesbläschen.

Hygienisch und einfach: die Applikationsmechanik.

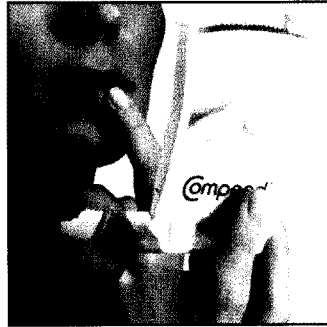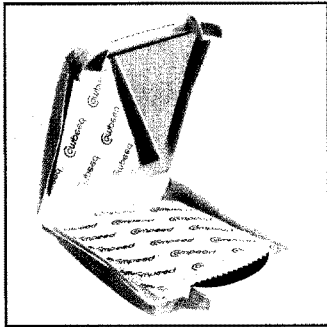

Integrierter Spiegel

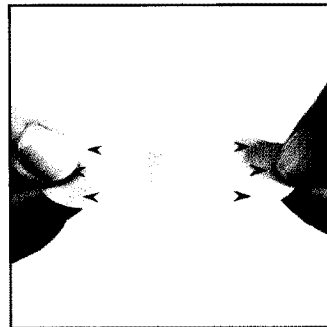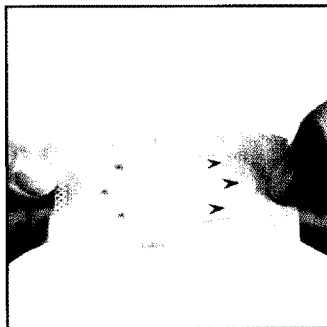

Butterfly-Technologie

Ein besonders unkompliziertes Auftragen der Patches bieten die innovative **Butterfly-Technologie** und der **in der Packung integrierte Spiegel**. 2 flügelartige Trägerfolien ermöglichen ein perfektes Abziehen, Platzieren und Fixieren der Patches.

Überzeugend im Test.

Die Compeed® Herpesbläschen-Patches überzeugten die Testpersonen in einer klinischen Studie:

- 92 % der befragten Personen verspürten weniger Juckreiz und Brennen.
- 90 % fanden die Behandlung von Lippenherpes mit Patch gegenüber der herkömmlichen Behandlung mit Salbe weniger auffällig.
- 86 % hatten keine Verkrustung und Narbenbildung.
- 71 % waren mit den Patches sehr zufrieden.
- 63 % der Befragten stellten ein schnelleres Abheilen der Wunde mit dem Compeed® Herpesbläschen-Patch fest (im Vergleich zu herkömmlichen Methoden).

Quelle: klinische Studie, Dänemark, 2004.

DAZ 47 11/06

LIPPENHERPES

Neu: Compeed Herpesbläschen-Patch

Das Compeed-Herpesbläschen-Patch, das seit Oktober in Apotheken erhältlich ist, bietet eine neuartige Behand-

lungsmöglichkeit bei Lippenherpes.
Eine Packung enthält 15 Patches

Das dünne Pflaster kann direkt auf die betroffene Hautstelle aufgetragen werden und umschließt das Lippenbläschen vollständig. Mit Hilfe einer speziellen Hydrokolloid-075-Technologie verdunstet ein Teil der Blasenflüssigkeit und der Rest bildet direkt über der verwundeten Stelle eine Art Feuchtigkeitspolster. So entsteht ein Wundheilungsmilieu, in dem das Lippenbläschen abheilen kann, ohne dabei auszutrocknen bzw. ohne Schorf zu bilden. Das Pflaster sollte schon beim ersten Kribbeln aufgetragen werden und bekämpft so die Symptome des Lippenherpes in jeder Phase der Erkrankung. Durch die Isolation des Herpesbläschens wird eine Verbreitung der Viren aus der Wunde weitgehend gestoppt und der Ausbruch wird diskret verdeckt.

Johnson & Johnson GmbH, Kaiserswerther Str.
270, 470 Düsseldorf

Pflaster gegen Herpes

Schon bei den ersten Anzeichen eines Lippenherpes sollte man handeln. Ein kleines, ultradünnes Pflaster von Compeed bietet jetzt eine neuartige Behandlungsmöglichkeit. Es kann direkt auf die betroffene Hautstelle aufgetragen werden und umschließt das Lippenbläschen vollständig. Mithilfe einer speziellen Hydrokolloid-075-Technologie verdunstet ein Teil der Blasenflüssigkeit und der Rest bildet direkt über der verwundeten Stelle ein Feuchtigkeitsspolster.

So entsteht ein optimales Wundheilungsmilieu, in dem das Lippenbläschen abheilen kann, ohne dabei auszutrocknen beziehungsweise ohne Schorf zu bilden. Das Pflaster sollte schon beim ersten Kribbeln aufgetragen werden. Durch die Isolation des Herpesbläschens wird eine Verbreitung der Viren aus der Wunde weitgehend gestoppt. Das Compeed Herpesbläschen-Patch ist in Apotheken erhältlich, enthält 15 Pflaster.

